


OMRON

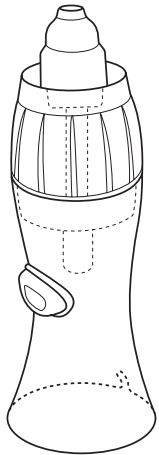

Nosová sprcha (NEB6014)

CE 0051

Návod na používanie

All for Healthcare

IM-NEB6014-SK-04-11/2022
Dátum vydania: 2022-11-16

Určenie

Medicínsky účel:

Tento produkt je systémom na zvlhčovanie nosa a je určený na používanie pri výplachu nosových a rhinofaryngeálnych dutín. Nosová sprcha je učená na opakované použitie u jedného pacienta.

Určený používateľ:

- Zdravotnícki odborníci (ako sú lekári, sestry a terapeuti) s oficiálnymi certifikátmi
- Poskytovatelia starostlivosti alebo pacienti pod vedením kvalifikovaných zdravotníckych odborníkov na domáce ošetrovanie.
- Používateľ musí byť zároveň schopný porozumieť všeobecným princípom činnosti tohto produktu a obsahu tohto návodu na používanie.

Pacienti, ktorým je určený:

Osoby všetkých vekových kategórií, ktoré vyžadujú výplach nosových a rhinofaryngeálnych dutín.

Prostredie:

Tento produkt je určený na použitie v bežnej domácnosti.


Dĺžka využiteľnosti:

Nosová sprcha približne 1 rok (približne 50 cyklov dezinfekcie)

Dĺžka využiteľnosti závisí od prostredia, v ktorom sa výrobok využíva, a môže byť odlišná.


Častým používaním tohto výrobku sa môže dĺžka využiteľnosti skrátiť.

Oboznámte sa so zariadením

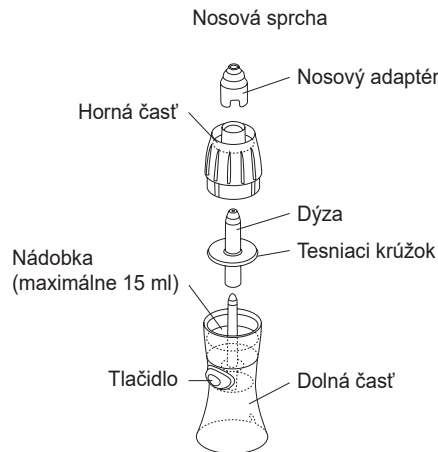

Ako funguje nosová sprcha

Roztok, ktorý sa privádza cez kanálik, sa zmiešava so stlačeným vzduchom, ktorý vytvára kompresorová pumpa. Stlačený vzduch zmiešaný s roztokom sa zmení na malé častice pripravené na zvlhčenie nosovej a rhinofaryngeálnej dutiny.

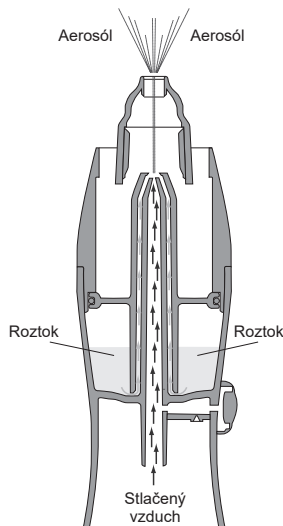

Dôležité bezpečnostné pokyny (prečítajte si pred použitím)


⚠ Výstraha:

1. Nosovú sprchu nepoužívajte na žiadne iné účely ako je určené použitie ako zariadenie na zvlhčovanie nosa.
2. Zariadenie používajte len v kombinácii s nasledujúcimi kompresormi spoločnosti Omron: C101 Essential, X101 Easy, C102 Total, X102 Total, Nami Cat, C28P a X105 Advanced. Akékoľvek iné použitie je nesprávne a môže byť nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za nesprávne použitie.
3. Zariadenie ukladajte mimo dosahu detí bez dozoru. Zariadenie obsahuje malé časti, ktoré by mohli prehltnúť.
4. Pri deťoch a osobách s postihnutím toto zariadenie používajte so zvýšenou opatrnosťou.
5. Z hľadiska typu, dávkovania roztoku a režimu sa riadte pokynmi svojho lekára, resp. odborníka na respiračné choroby.
6. Tento výrobok nesmú používať pacienti v bezvedomí ani pacienti bez spontánneho dýchania.
7. Ak sa v priebehu používania prejavia nejaké alergické reakcie alebo iné ťažkosti, ihneď prestaňte nosovú sprchu používať a obráťte sa na odborníka.
8. Nosová sprcha je učená na použitie u jedného pacienta. Nepoužívajte u viacerých pacientov. Pri každom pacientovi používajte samostatnú nosovú sprchu.
9. Po každom použití vyčistite súčasti a pri bežnom používaní raz za týždeň ich podrobte dezinfekcii.

Postup

Priprava nosovej sprchy

1. Aby ste mohli pridať liečivo do nádoby pre nosovú sprchu, odstráňte hornú časť z nádoby, ako je zobrazené na obrázku.
2. Nalejte roztok do nádoby (max 15 ml).
3. Zatvorte nosovú sprchu vrátením hornej časti na miesto.
4. Pripojte jeden koniec vzduchovej hadičky k nosovej sprche a druhý koniec ku kompresoru. Zapnutím kompresora začnete liečbu.

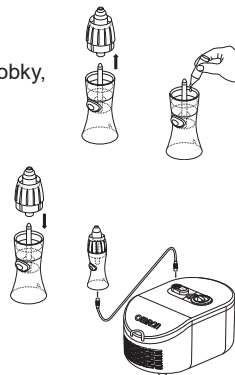

Prevádzka nosovej sprchy

Nosovú sprchu používajte stlačením tlačidla a jeho uvoľnením pred výdychom/počas neho. Počas liečby si jedným prstom upchajte druhú nosnú dierku, do ktorej neaplikujete nosovú sprchu.

U detí a osôb s postihnutím aplikujte do oboch nosných dierok striedavo, meňte každých 10 – 20 sekúnd. Majte pripravenú vreckovku, aby ste si mohli osušiť nosné dierky, ak hlien pretečie zo zachytávacej časti v hornej časti nosovej sprchy.

Keď začne z nosovej sprchy miznúť hmla, liečba je dokončená. Odstráňte hornú časť nosovej sprchy vrátane tesniaceho krúžku. Zlikvidujte akúkoľvek tekutinu nahromadenú v hornej časti.



Poznámka: NIKDY ZARIADENIE NEPOUŽÍVAJTE V HORIZONTÁLNEJ POLOHE. NIKDY NOSOVÚ SPRCHU NENAKLÁŇAJTE O VIAC AKO 60°.

Čistenie a dezinfekcia

Pred čistením a dezinfekciou častí nosovej sprchy si dôkladne umyte ruky. Po každom použití vyčistite súčasti zariadenia tak, aby sa z nich odstránili zvyšky roztoku. Tým sa zabráni neúčinnnej liečbe a obmedzuje sa vznik infekcie.

• Čistenie nosovej sprchy:

Nosovú sprchu úplne rozložte. Umyte časti teplou vodou so šetrným neutrálnym čistiacim prostriedkom. Dôkladne ich opláchnite v čistej horúcej vode z vodovodu, jemne poklepte, aby sa odstránila nadbytočná voda, a nechajte ich na čistom mieste vyschnúť.

• Dezinfekcia nosovej sprchy:

Pred prvým použitím produktu a po jeho dlhodobom nepoužívaní vždy vydezinfikujte jednotlivé súčasti. Súčasti dezinfikujte raz za týždeň. Očakáva sa, že súčasti vydržia približne 50 cyklov dezinfekcie. Ak sa súčasti veľmi znečistia, nahraďte nosovú sprchu novou. **Nosovú sprchu možno dezinfikovať pomocou chemických dezinfekčných látok, ako napríklad etanol, chlórnan sodný (Milton), kvartérne amonné soli (Osvan), chlórhexidín (Hibitane) a amfoterické surfaktanty (Tego), podľa pokynov na dezinfekčnom čínidle a opláchnuť ich čistou teplou vodou.** Nechajte vysušiť na vzduchu. **Poznámka:** Zariadenie nečistíte benzénom, riedidlom ani žiadnymi horľavinami.

Vyváranie: Nosovú sprchu možno tiež dezinfikovať varom počas aspoň 5 minút vo veľkom množstve vody. Po ukončení vyvárania starostlivo povyberajte jednotlivé súčasti, vytraste nadbytočnú vodu a nechajte v čistom prostredí vyschnúť.

Riešenie problémov

V prípade, že zariadenie nefunguje správne, pozrite nižšie:

- Najprv skontrolujte, či je nosová sprcha správne zložená.
- Presvedčte sa, že vzduchová hadička (nie je súčasťou súpravy) nie je stlačená ani ohnutá.
- Presvedčte sa, že bolo do nosovej sprchy vložené dostatočné množstvo roztoku.

Ak problém pretrváva, zaneste zariadenie autorizovanému predajcovi alebo distribútorovi produktov OMRON.

Nahláste výrobcovi a poverenému orgánu v členskom štáte, v ktorom sa nachádzate, prípadný vážny incident, ku ktorému došlo v súvislosti s týmto zariadením.

Technické údaje

Kategória produktu:	Príslušenstvo na aerosólovú terapiu
Výrobok:	Nosová sprcha
Model: #	NEB6014
Vhodný roztok	
Množstvo:	min. 3 ml – max. 15 ml
Veľkosť častíc:	90 % častíc > 10 µm
Rýchlosť inhalácie (strata hmotnosti):	viac ako 5 ml/min (0,9 % NaCl)
Prevádzková teplota, vlhkosť a tlak vzduchu:	+5 °C až +40 °C/ 15 % až 85 % RV/700 až 1060 hPa
Skladovanie a preprava	
Teplota, vlhkosť a tlak vzduchu:	-20 °C až +60 °C/ 5 % až 95 % RV/500 až 1060 hPa
Hmotnosť:	približne 30 gramov
Rozmery:	približne Ø 50 x 139 (V) mm
Obsah:	Nosová sprcha, návod na používanie

LOT	= Číslo šarže		= Dátum výroby
MD	= Zdravotnícka pomôcka		= Pozrite si návod na používanie
UDI	= Unikátny identifikátor pomôcky		

Likvidácia

Na konci očakávanej doby využiteľnosti možno produkt zlikvidovať s bežným domovým odpadom.

Výrobca 	3A HEALTH CARE S.r.l. Via Marziale Cerutti, 90F/G 25017 Lonato del Garda (BS) Taliansko
Distribútor 	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANSKO www.omron-healthcare.com
Dcérske spoločnosti	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors
Distribúcia a servis pre SR	CELIMED s.r.o. Pri majeri 22, 831 06 Bratislava www.celimed.sk, info@celimed.sk, tel: 02 4468 1247

Vyrobené v Taliansku